

patron®

Návod k použití (CZ) - rehabilitační autosedačka

SASCHA



Distributor v ČR:

PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419
CZ- 27601 Mělník, Česká Republika
tel.: +420-315 630 111
fax.: +420-315 630 199
Info.cz@patro.eu
[http:// www.patron.eu](http://www.patron.eu)

Výrobce:










Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestraße 3
D-49205 Hasbergen
Deutschland



SCHEMA / SCHEMA(DE) / SCHEMA / SCHEMA



TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE DATEN	TECHNICKÉ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE	MINI	STD	MAXI
Overall length	Gesamtlänge	Celková délka	Celková délka	400 mm	450 mm	500 mm
Overall width	Gesamtbreite	Celková šířka	Celková šířka	320 mm	360 mm	400 mm
Overall height	Gesamthöhe	Celková výška	Celková výška	650/ 750mm	710/830 mm	820/920 mm
Seat depth	Tiefe der Sitzeinheit	Hlubka sedáčky	Hĺbka sedáčky	250/300 mm	300/350 mm	350/400 mm
Seat width	Breite der Sitzeinheit	Šířka sedáčky	Šírka sedáčky	280 mm	320 mm	360 mm
Lifting capacity	Tragkraft	Nosnost	Nosnosť	30 kg	45 kg	60 kg

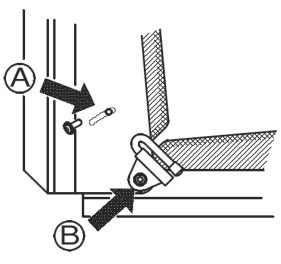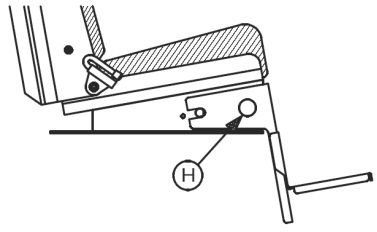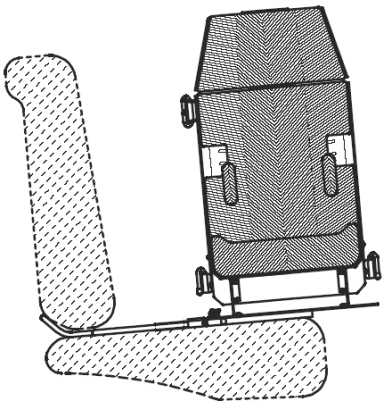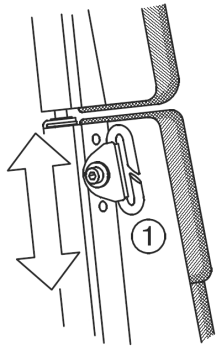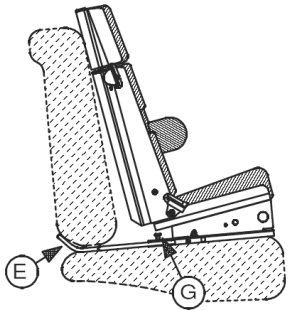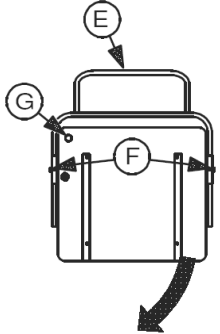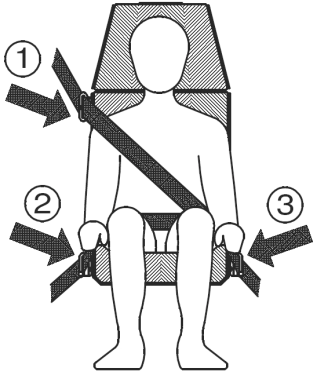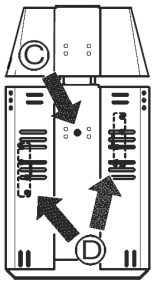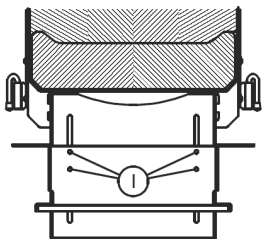

Vážení zákazníci,
děkujeme za Vaši přízeň a zakoupení speciálního zadržného systému autosedačky SASCHA.

Prosíme Vás, abyste si před tím, než uvedete výrobek do provozu, pozorně přečetli a řídili se bezpečnostními pokyny, pokyny v návodu na použití a instrukcemi.

V případě nehody, bylo-li zařízení vystaveno nárazu, je třeba toto zařízení vyměnit!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **UPOZORNĚNÍ: Před použitím si přečtete pečlivě návod a neschovejte jej pro pozdější nahlédnutí. Bezpečnost Vašeho dítěte může být ohrožena, pokud nebudete postupovat podle návodu.**
- **UPOZORNĚNÍ: Tato rehabilitační sedačka musí být umístěna na zadní sedadlo, musí být vždy nasměrována ve směru jízdy.**
- **UPOZORNĚNÍ: Umístěte autosedačku do auta tak, aby zadní část byla pevně přitisknuta na sedadlo směrem k zadní části vozu.**
- **UPOZORNĚNÍ: Ponechat dítě bez dozoru může být nebezpečné. Před použitím autosedačky se přesvědčte, že všechna zajišťovací zařízení jsou zapojena.**
- **UPOZORNĚNÍ: Vždy užívejte pouze autosedačku namontovanou shodně s návodem k použití.**
- **UPOZORNĚNÍ: Při použití autosedačky musí být dítě připoutáno pětibodovým pásem autosedačky a sedačka tříbodovým pásem automobilu.**
- Nikdy nepřevázejte dítě v autosedačce neupevněné automobilovým bezpečnostním pásem. Autosedačku lze používat pouze v automobilech vybavených tříbodovými bezpečnostními automobilovými pásy dle normy UN/ECE 16.
- Během cesty nenechávejte v autě volně ležet předměty nebo zavazadla, v případě nehody mohou způsobit zranění.
- Nepoužívejte žádná noriginální příslušenství k autosedačce, která nebyla schválena výrobcem autosedačky.
- V případě nehody je nutné autosedačku nadále nepoužívat až do jejího zkontrolování odborným servisem.
- Každá změna nebo doplnění musí být schváleno příslušnými úřady.
- Společnost PATRON nese zodpovědnost za škody způsobené používáním jiných doplňků než dodávaných touto firmou.
- Společnost PATRON nese zodpovědnost za škody a nehody způsobené nesprávnou manipulací s autosedačkou.

NÁVOD K POUŽITÍ

Použití speciálního zadržného systému autosedačky v automobilu:

Nastavení náklonu zad

Požadovaný sklon opěrky zad můžete nastavit pote, co uvolníte a odstraníte šrouby **A** (všimněte si matice na vnitřní straně) a uvolníte šrouby **B** (vždy na levé a pravé straně). Náklon zad lze nastavit stupňovitě 3° od 90° do 108°.

Po nastavení šrouby/matičky opětovně nasadte a ujistěte se, že je vše správně utaženo.

Dbejte na to, aby dolní vedení pasu bylo v 45 ° k panelu sedačky.

Nastavení opěrky hlavy/postranních polst

Uvolněte šroub **C**, nyní můžete plynule nastavit výšku opěrky hlavy. Při nastavování dbejte na to, aby hlava dítěte končila nejméně 2 cm pod horním okrajem opěrky hlavy.

Polici postranních polst můžete změnit nast, co uvolníte a odstraníte všechny tři šrouby **D** prolamaného vzoru na zádomém plechu.

Všechny šrouby opětovně pevně utáhněte.

Obsluha pasu

Pote co dítě posadíte do sedacího a zadržovacího zařízení a zajistíte mu vhodnou pozici k sezení, přiložte a upevněte nejdříve pasy určené pro zafixování postížených dětí (fixace ramen a hrudnická a jiné fixace).

Nyní upevněte vlastní 3bodový pas vozidla. Přitom pas vedte všemi třemi sponami pro pas **1, 2, 3**. Horní pouto pro pas je k tomuto účelu vybaveno výtezem.

Dbejte na to, aby 3bodový pas nebyl překroucen a přiléhá těsně k sedačce a dítěti, aby se v rozhodném případě zmenšilo „volné“ spojení.

Obzvlášť se přesvědčte o tom, že poutko pro upevnění ramenního pasu **1** není příliš nízko (pas se nachází pod úrovní ramene) nebo příliš vysoko (pas se nachází již u krku). Polici tohoto poutka můžete změnit po uvolnění šroubového uzávěru v mířce (pravý obrázek).

Předtím musíte odejmout umělohmotnou krytku (posunout směrem dozadu). Poté šroubový uzávěr pečlivě složte a utáhněte.

Sedací a zadržovací zařízení můžete umístit jak na pravé tak na levé straně vozidla.

Pravá strana (ve směru jízdy): horní vedení pasu **1** namontovat vpravo

Levá strana: horní vedení pasu **1** namontovat vlevo

Umístění a obsluha ve vozidle (Sascha – sedací a zadržovací zařízení pro osobní automobily/výklonné)

Umístění na sedadle vozidle

Nastavte požadovaný náklon zad, dle pokynů uvedených výše. Pote sedačku položte na zadní sedadlo vozidla, přičemž současně prostrčte rameno **E** mezi polstrování sedáka a opěrky vozidla.

Pote co uvolníte oba šrouby **F**, můžete nastavit rameno horizontálně.

Otočení /zahnutí sedačky

Abyste otočili sedačku, musíte zatáhnout za aretovací kolík **G**. Nyní můžete otočit sedačku o cca. 90°. Pro zahnutí opětovně sedačku otočte, dokud slyšíte tělně nezacvakne aretovací kolík.

Obsluha pasu

Podívejte se na pokyny pro jednoduché sedací a zadržovací zařízení pro osobní automobily. Před otočením musíte přirozeně uvolnit 3bodový pas, může ale po jedné straně zůstat buď v horním nebo dolním upevňovacím poutu.

Odejmutí a nastavení stupačky

Poté co zmačknete obě černá tlačítka **H** po stranách vpravo i vlevo, můžete vytáhnout stupačku směrem dopředu.

Při nasazení stupačky dbejte na to, aby obě tlačítka slyšitelně opět zacvakla.

Poté co uvolníte všechny čtyři šrouby **I**, můžete stupačku plynule výškově nastavovat.

Všechny šrouby poté opětovně utáhněte.

(otočný disk a stupačka nejsou součástí základní výbavy)

ÚDRŽBA

- potah sedačky lze (po uvolnění zipu) prát v pračce při 30°C pracím prostředkem na jemné prádlo. Chemicky nečistit!
- schnout nechte volně, nežehlete, nedávejte do sušičky (viz symboly pro údržbu na potahu)
- nikdy sedačku nečistíte čisticími prostředky na bázi amoniaku, bělidly a lihovými čistidly a chemickými rozpouštědly
- nevystavujte působení vysokých teplot ani dlouhodobému intenzivnímu slunečnímu záření
- sedačku ukládejte na suchém místě

- K opravám mohou být použity jen náhradní díly dodávané společností PATRON

Změny jsou vyhrazeny.

SCHEMA - popis

1. sedák
2. Opěra hlavy
3. Zádová opěra
4. Pětibodový bezpečnostní pás

PODMÍNKY UŽITÍ

Výstupní kontrola:

Jméno:

Podpis:



CZ

Podmínky užití:

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
5. Reklamacie musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamacie se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
6. Při uplatnění reklamacie musí uživatel nezpochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamacie se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce nezodpovídá. Majitel je povinen předbžít reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
9. Uplatnění práva z vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, zejména na znečištění, opotřebení, či poškození potahu, plastových dílů, opotřebení brzd, opotřebení dezénu či defektu pneumatik. Uplatnění práva z vady také pozbývá platnosti, byly-li závady způsobeny nedovoleným přetěžováním, nehodou, mechanickým poškozením, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku či neodborným zacházením s ním.
10. Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy, proto tato skutečnost nemůže být předmětem reklamacie.
11. Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.

Datum prodeje (den, měsíc, rok):

Jméno (hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce:
