



Návod k použití (CZ)

Elektrický zvedák do vany Bellavita



Distributor v ČR:

PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419
CZ- 27601 Mělník, Česká Republika
tel.: +420-315 630 111
fax.: +420-315 630 199
reha.cz@patron.eu
www.patron.eu

Výrobce:

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44
88316 Isny/Allgäu
Deutschland

Vážení zákazníci,

gratulujeme Vám ke koupi vašeho vanového zvedáku Bellavita. Vanový zvedák Bellavita byl vytvořen tak, aby poskytl svým uživatelům nejvyšší bezpečnost a komfort. Vanový zvedák Bellavita může být použit v domácím prostředí, ve víceúčelových zařízeních i odborníky ve zdravotnictví. Vážně postižení lidé by neměli vanový zvedák používat bez pomoci jiné osoby, která jim v případě potřeby pomůže. Před použitím si pečlivě přečtete návod na použití vanového zvedáku. Dodržujte veškeré instrukce zde uvedené, zejména bezpečnostní instrukce. Doufáme, že s vanovým zvedákem Bellavita se pro Vás koupel stane mnohem bezpečnější a jednodušší.

Bellavita je vanový zvedák postaven z vysoce kvalitních, recyklovatelných lehkých plastů. Díky tomu se výrobek snadno přepravuje a skladuje. Lithium-iontová baterie je umístěna v ručním ovladači. Díky ručnímu ovládání si může uživatel sám vanový zvedák polohovat, zatím co pohodlně sedí ve zpřímené poloze. Řídící elektronika i hnací motor jsou vodotěsné, Bellavitu můžete používat i ve sprše. Vanový zvedák lze snížit až na 6,5cm a zvýšit do 48cm.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **Nikdy vanový zvedák Bellavita nepoužívejte jako stojan, zdvihací zařízení, žebřík, nebo pro jakékoli podobné účely. Zvedák je pouze pro použití za účelem vykoupání se ve vaně.**
- **VŽDY udržujte zvířata a děti mimo dosah vanového zvedáku.**
- **V případě poruchy nebo poškození, se obraťte se ihned na specializovaného prodejce.**
- **Opravy musí být prováděny výrobcem!**
- **Výšky lze změnit pouze pokud je opěradlo ve svislé poloze a plně uzamčeno.**
- **Neukládejte výrobek v blízkosti tepelného zdroje.**

Před přepravou zvedáku odpojte ruční ovládání.

- V případě, že byl zvedák po delší časové období vystaven nízkým teplotám, nechte ho před použitím ohřát na pokojovou teplotu, aby se zabránilo poškození.
- Pokud používáte koupelové oleje nebo soli, dodržujte doporučenou dávku - přísady mohou mít vliv na povrch zvedáku.
- Pro čištění zvedáku Bellavita nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani čisticí prostředky kyseliny octové.

Akumulátor

nabíječka baterií a ruční ovládání

- Ruční ovládání používejte pouze k ovládání vanového zvedáku. Ničím jiným vanový zvedák neovládejte.
- Nikdy ruční ovládání nevhazujte do otevřeného ohně a neukládejte v blízkosti ohně nebo silného tepelného zdroje.
- Ruční ovládání neotvírejte. Otevření ovladače zruší platnost záruky.
- Používejte pouze nabíječku dodávanou pro nabíjení baterie.
- Nepoužívejte ovládání, pokud pouzdro vykazuje jakékoliv známky poškození.
- Používejte nabíječku jen v suchých místnostech mimo koupelnu. Používejte nabíjecí jednotky pouze pro nabíjení dodávaného akumulátoru.
- Je nezbytné nutné aby byla baterie plně nabitá před prvním použitím zvedáku Bellavita - poté by měla být nabíjená po každém použití.

Pokud přístroj není používán delší dobu, baterie by měla být nabitá znovu každý 3 měsíce s cílem zvýšit dlouhověkost zařízení.

- Neukládejte žádné vodivé předměty (např jehly, kovové kolíky atd.) do zdířky zásuvky ovladače!
- Před čištěním nabíječky vždy odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Vyčistěte nabíječku pouze suchým hadříkem.
- Bellavita, nabíječka baterií a baterie, jsou velmi pevné, avšak by neměly být házeny na zem. Pokud byste našli viditelné nebo zvukové známky poškození, nepoužívejte ovládání a neprodleně informujte prodejce.

NÁVOD K POUŽITÍ

Důležité bezpečnostní pravidla:

Vždy se posaďte doprostřed sedáku s opěradlem, s nohama nataženými mírně vpřed. Rukou se držte okraje vany. Druhou rukou ovládejte polohu zvedáku. Ruce nepokládejte pod sedadlo, ani za opěradlo. Mohlo by dojít k poranění. Osoby s těžkým mentálním postižením, nesmí být nikdy ponechány při koupeli bez dozoru!

Během používání Bellavita nepoužívejte žádné předměty, které by mohly uvíznout ve zvedáku.

Poznámky týkající se elektromagnetické kompatibility:

Tento produkt je v souladu s ochrannými požadavky stanovenými směrnicemi.

Nicméně, výskyt elektrického rušení nelze zcela vyloučit.

Pokud se Vám zdá chování zvedáku Bellavita neobvyklé, prosím kontaktujte prodejce.

Po rozbalení:

Prosím, zkontrolujte obsah balení Bellavita, měl by obsahovat následující součásti :

1. Pohonná jednotka s integrovanou opěrkou zad, ruční ovládání (s integrovanou baterií)

2. Sedací jednotka s postranními chloupnými

3. Nabíječka baterií

4. Návod k použití

5. 4 x přísavky průměr 75 mm

Pokud nějaká součást chybí nebo je poškozena, informujte svého specializovaného prodejce!


Nejprve vybalte nabíjecí jednotku, pak zbývající díly. Před prvním použitím doporučujeme zařízení nabít. Dodržujte informace uvedené v kapitole "Nabíjení"

Rozložení zvedáku Bellavita:

V podstavě jsou připraveny čtyři osmičkové otvory pro přísavky. Přísavku vložte do připraveného otvoru tak, aby zatěšňovací část směřovala směrem vzhůru a přísavku zasuňte do užší části osmičkového otvoru. Zatěšňovací čáší přísavky utěsněte zbylý prostor otvoru. Přísavka by se neměla posouvat, ani hýbat.

Pro pevné a bezpečné přilnutí přísavky s povrchem vany je důležité, aby byla vana při umísťování zvedáku čistá a suchá! Ve vaně nesmí být žádné protiskluzové podložky a podobně.

Nyní vložte pohonnou jednotku s integrovanou opěrkou zad do ložiska bloků sedačky (viz obrázek).

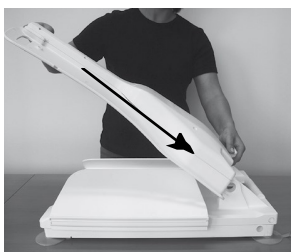

Nyní držte opěradlo v obou rukách, a zacvakněte do ložisek podstavy. Připojte ruční ovládání do zvedáku. Spojte zásuvku se zástrčkou, která je umístěna v zadní části opěradla. Zvedák je nyní připraven k pohybu.

Zvedací tyč je umístěna správně v odemknutí rampě.



špatně



správně


Nasazení a sejmутí potahu

Potahy jsou odnímatelné velice snadno.

Potah umístěte na příslušnou část zvedáku Bellavita a zacvakněte do příslušných otvorů (viz obrázky).



Chcete-li sejmout potah, vytáhněte upevňovací tlačítka dvěma prsty.
Zvedák Bellavita může být používán i bez potahu.

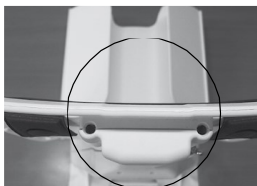

Opěrka hlavy (volitelné)

Tyče opěrky hlavy zasuněte do otvorů v horní části opěrné desky.

Opěrku hlavy můžete snadno upravit do požadované výšky.

Ruční ovládání


Kapacita plně nabitého akumulátoru je maximálně na 6 lázní, závisí však na hmotnosti koupané osoby. Během koupání svítí na ručním ovladači zelená kontrolka.

Oranžová kontrolka značí slábnutí baterie. Pokud začne oranžová kontrolka blikat, baterie vydrží do konce koupele, poté by dle návodu měla být nabita. Při používání zvedáku i přes oranžovou signalizaci, se změní světlo na barvu červenou, blikající v rychlých intervalech. V tomto případě se bude zvedák pohybovat pouze směrem vzhůru, zajistí tak bezpečné vystoupení z vany. Baterii nechte nabít dle návodu.

Zelená kontrolka: zvedák je připraven k provozu

Oranžová kontrolka: omezená připravenost k provozu zvedáku - Dostatečně pro jednu koupel. Baterie by měla být nabita.

Červená kontrolka: zvedák není připraven k provozu - zvedák se bude pohybovat pouze směrem nahoru. Baterie se musí nabít okamžitě.

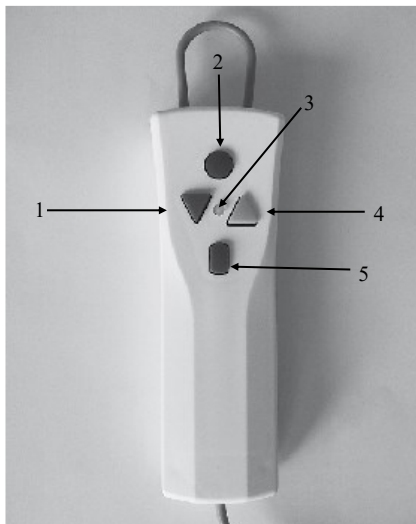

Vanový zvedák Bellavita se automaticky vypne po cca 30-ti minutách. Chcete-li jej vypnout ručně, stiskněte červené tlačítko na ručním ovladači (kontrolka zhasne).


- 1 Dolů (modrá)
- 2 Tlačítko vypnutí (červená)
- 3 Světelná kontrolka (LED)
- 4 Nahoru (žlutá)
- 5 Tlačítko aktivace (zelená)

KOUPÁNÍ S VANOVÝM ZVEDÁKEM


Po instalaci vašeho vanového zvedáku Bellavita do vany, kdy máte mezi stojnicí zvedáku a vanou prostor minimálně 2mm na každé straně, spojte kabel plně nabitého ručního ovladače s konektorem na zadní části zádové opěry. Uchopte ruční ovladač a stiskněte žluté tlačítko (nahoru). Držte je stále stisknuté a vanový zvedák se zvedne. Když dojde do polohy shodné s nejvyšší úrovní vaší vany, tlačítko uvolníte a vanový zvedák se zastaví. Posadte se na postranní opěrku sedáku vanového zvedáku (tato část bude později opěra o boční stranu vany). Posuňte se do středu sedáku a pak přendejte nohy přes okraj vany směrem dovnitř. Otočte se tak, aby jste seděli ve správné pozici pro pohodlné koupání. Jestliže máte problémy se posunout nebo natočit, je pro vás ideální „rotační a přesuvný disk“, (možno dokoupit jako doplněk ke zvedáku).

Stisknutí modrého tlačítka (dolů) na vašem ručním ovladači, vás sníží do potřebné pozice pro koupání.


Vanový zvedák vás snese bezpečně a pohodlně na dno vany (obr 8). Na dně vany, budete stále sedět v úhlu 20 stupňů (obr 9). Jestliže se chcete opřít a jste na dně vany, jednoduše pokračujte stisknutím modrého tlačítka (dolů) a zádová opěra se nakloní. (Můžete se opřít maximálně do úhlu 40 stupňů - obr.10).

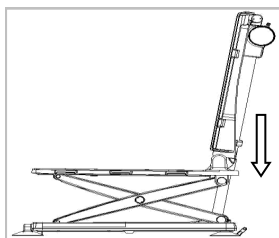

Obr.8

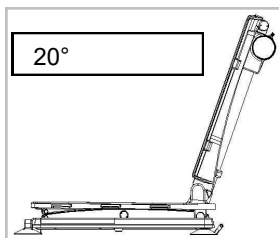

Obr.9

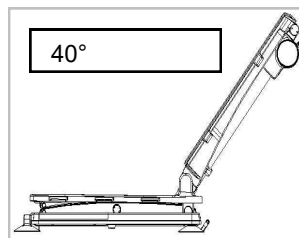

Obr.10

Zastavít polohování zad můžete kdykoliv, když jednoduše přestanete mačkat tlačítko. Až dokončíte koupel, stiskněte žluté tlačítko (nahoru) na ručním ovladači. Pokračujte v držení tlačítka dokud vanový zvedák nedosáhne pozice nejvyšší úrovně vaší vany. Postranní opěry se opět narovnávají na okraji vany.

VYJMUTÍ ZVEDÁKU Z VANY


Vypusťte vodu z vany.

Stisknutím modrého tlačítka (dolů) na ručním ovladači snižte vanový zvedák do nejnižší možné pozice ve vaně (obr.11), a držte tlačítko stisknuté dokud se opěra zad nesklopí do úhlu přibližně 27 stupňů a více (obr.12).


Uchopte postranní opěry na obou stranách a sklopte je směrem dovnitř k sedáku.

Uchopte opěru zad, a stlačte přímo směrem do sedací části (potahem dolů)(obr.13).


!!! VŽDY NEJDRŽÍVE ODPOJTE RUČNÍ OVLADAČ NEŽ SKLOPÍTE ŽÁDA VANOVÉHO ZVEDÁKU DO SLOŽENÉ POLOHY !!!

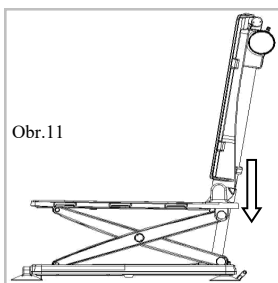

Obr.11

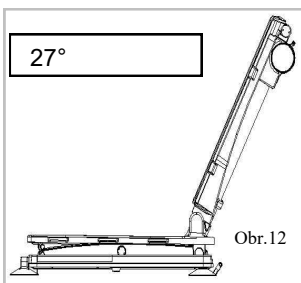

Obr.12

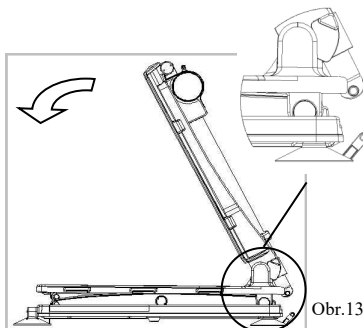


Obr.13

Odejměte opěru zad ze základu vyzvednutím přímo nahoru (obr.14).


Drážky opěry zad se odpojí od drážek zvedáku.

Odejměte sedák: jednou rukou zvedněte přísavky na zadní části (obr.15) - přísavky na přední části se automaticky oddělí (obr.16). Druhou rukou vyzvedněte i přední část zvedáku.


Nyní můžete vanový zvedák uložit.

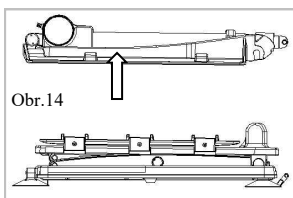

Obr.14

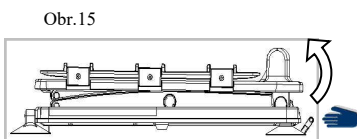

Obr.15

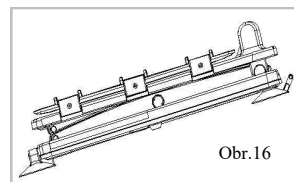

Obr.16


DOPLŇKY

ROTAČNÍ A POSUVNÝ DISK (obr.17)

Bellavita přenosný disk Vám pomůže dostat se na zvedák a z vanového zvedáku jednoduše a bezpečně. Je ideální pro lidi, kteří mají problémy se přesunout „na“ a „z“ vanového zvedáku a umožňuje jim snadno se posunout a otočit do středu sedadla vanového zvedáku.

OPĚRKA HLAVY

Bellavita hlavová opěrka navíc poskytne oporu a komfort zatímco se koupete.

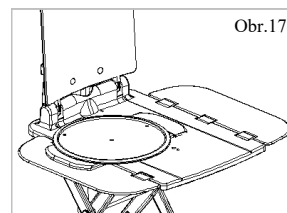

Obr.17

LIKVIDACE

Po uplynutí provozní doby baterie – pohánějící vanové zvedáky, nabíjecích ručních ovladačů, nabíjecích jednotek, příslušenství a balícího materiálu musí být s těmito správně zacházeno.

Jednotlivé části mohou být rozděleny a naloženo s nimi podle typu materiálu.

Zvedák Bellavita neobsahuje žádné nebezpečné materiály.

Avšak ruční ovladač nesmí být zařazen do běžného odpadu domácnosti

SERVIS A ÚDRŽBA

- VANOVÝ ZVEDÁK BELLAVIATA vyžaduje minimální údržbu / servis. Prosím, zkontrolujte, že chod vanového zvedáku pracuje tak jak má a ve správných intervalech.
- Pro vyčištění vanového zvedáku, použijte běžný mycí prostředek a navlhčený hadřík.
- VANOVÝ ZVEDÁK BELLAVITA může být použit s nebo bez potahů. Standardní potahy můžete snadno odejmout a vyprat v pračce na maximální teplotu 60°. Nesušte v bubnové sušičce! Pověste je a nechte volně uschnout.
- Můžete používat také různá změkčovadla, koupelové krémy a oleje pro koupel s vanovým zvedákem, avšak, ujistěte se, že jste zcela vymyli / vyčistili zbytky z vany a přísavek. Také Vám doporučujeme prát potahy častěji.
- Pravidelně kontrolujte a dotahujte šroubové spoje.
- Jsou-li použita ovládací lanka (brzdy, teleskopy, naklápění), pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby seřídte a promažte.

Bellavita může být použit ve vaně, tak aby asistoval lidem při přesunutí do vany a z vany. Neměl by být použit jako opěra nebo výtahová rampa mimo vanu. Prosím uvědomte si, že vanový zvedák není hračka a dětem by nemělo být dovoleno si s ním hrát.

Technické údaje:

Celková délka	830 mm	Šířka opěradla	320-360 mm
Celková šířka	700 mm	Výška opěradla	640 mm
Šířka sedáku	350 mm	Hmotnost bez ovládání	9,3 kg
Výška sedáku	65-480 mm	Celková hmotnost	9,7 kg
Hloubka sedáku	420 mm	Maximální zatížení	140 kg
Maximální úhel opěradla	10-50°		

PODMÍNKY UŽITÍ

Výstupní kontrola:

Jméno:

Podpis:

Identifikační štítek / Typ výrobku:

Podmínky užití:

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, anižby původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
5. Reklamacce musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamace se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
6. Při uplatnění reklamace musí uživatel nezpochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamace se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce nezodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
9. Uplatnění práva z vady se nevztahuje na opotřebené věci způsobené jejím obvyklým používáním, zejména na znečištění, opotřebení, či poškození potahu, plastových dílů, opotřebení brzd, opotřebení dezénu či defektu pneumatik. Uplatnění práva z vady také pozbývá platnosti, byly-li závady způsobeny nedovoleným přetěžováním, nehodou, mechanickým poškozením, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku či neodborným zacházením s ním.
10. Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy, proto tato skutečnost nemůže být předmětem reklamace.
11. Doba uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užžitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.

Datum prodeje (den, měsíc, rok):

Jméno (hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce:

_____. _____. _____.
.