



## Chodítko čtyřkolové ALU Tiger s područkami

### Návod k použití





Mobilex A/S  
Grønlandsvej 5, 8660  
Skanderborg, Denmark  
info@mobilex.dk  
www.mobilex.dk

Distributor v ČR:  
**PATRON Bohemia a.s.**  
Českolipská 3419, 276 01 Mělník, ČR  
tel.: 315 630 111  
[info.cz@patron.eu](mailto:info.cz@patron.eu) , <http://www.patron.eu>



(Návod k použití - datum poslední revize: 11.01.2024)

## 1. Úvod

Děkujeme vám, že jste si zakoupili vysoce kvalitní produkt Mobilexu. Tento návod k použití obsahuje podrobný popis produktu a důležité pokyny pro správné používání produktu. Návod si musíte před použitím produktu pečlivě přečíst. Vždy dodržujte všechny pokyny, zejména pokyny týkající se bezpečnosti, abyste mohli produkt bezpečně používat dlouhodobě.

## Účel

Chodítko "Tiger" je vhodné pro potřeby pacientů s artritidou, protože jim umožňuje pohybovat se bez obtíží a zvyšuje jejich pohyblivost. Zátěž se nesnižuje přes ruce, ale přes podpaží.

Uživatel musí mít určitou sílu, aby mohl výrobek používat.

Chodítko bylo navrženo tak, aby zvýšilo mobilitu osob, které mají potíže se stáním nebo chůzí.

Chodítko umožňuje těmto osobám znovu získat schopnost vykonávat každodenní práce. Chodítko je vhodné pro

osoby, které v důsledku různých onemocnění potřebují stabilní oporu při chůzi.

Místo klasických madel je vybaveno vysokou podpažní opěrkou, takže uživatel získá vyšší stabilitu. Chodítko by mělo být používáno pouze jako opora při stání, chůzi a sezení.

Upozorňujeme, že chodítko lze používat pouze v interiéru.



**Upozornění:** Chodítko by neměli používat lidé s problémy s rovnováhou, jejichž svaly jsou silně oslabené, a proto nejsou schopni samostatně stát nebo chodit.

Podpěry snižují stabilitu chodítka, proto jej lze používat pouze na hladkém povrchu v interiéru. Překážky, jako jsou schody u dveří apod. je třeba upravit pomocí nájezdových ramp Mobilex nebo gumových nájezdů.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce nebo na společnost Mobilex A/S.

## 2. Bezpečnostní pokyny

- Výrobek použijte pouze v případě, že je technicky bezvadný.
- V případě jakéhokoli poškození nebo závady výrobku se neprodleně obraťte na svého prodejce.
- Dbejte údajů uvedených na štítku výrobku
- Výrobek používejte pouze k popsanému účelu
- Vezměte prosím na vědomí, že na všech kloubech chodítka hrozí nebezpečí poranění.
- Vždy před použitím zkontrolujte, zda brzdy kol bezvadně fungují
- Vozíček používejte pouze tehdy, když je zcela rozložen a je aktivováno blokovací zařízení.
- Chodítko by mělo být používáno pouze v interiéru na rovném stabilním povrchu.
- Sedačku lze používat pouze tehdy, když jsou brzdy pevně zajištěny.
- Obě brzdy by měly být vždy aktivovány nebo zablokovány současně.
- Maximální zatížení kolečkového křesla je celkem 150 kg.
- Maximální zatížení nákupní tašky je 5 kg
- Není povoleno přepravovat na sedadle další osobu.
- Výrobek nesmí být upravován bez písemného souhlasu výrobce.
- Kolečka musí být vždy zabrzděna, pokud se nepoužívají.
- Chodítko se smí používat pouze v interiéru.

## 3. Popis


Chodítko Mobilex "Tiger" má práškově lakovaný rám a 4 kola. Díky lehkému rámu jej lze snadno složit a nabízí snadné skladování a přepravu. Chodítko se snadno pohybuje a je dostatečně stabilní. Výšku podpažních opěrek lze nastavit. Chodítko je dodáváno s namontovaným sedátkem a nákupní taškou.

### Dodávané díly a návod k montáži

Chodítko Mobilex "Tiger" je dodáváno v kartonu s následujícím obsahem:

#### Dodávané díly:

- ✓1 chodítko
- ✓Tento návod k použití

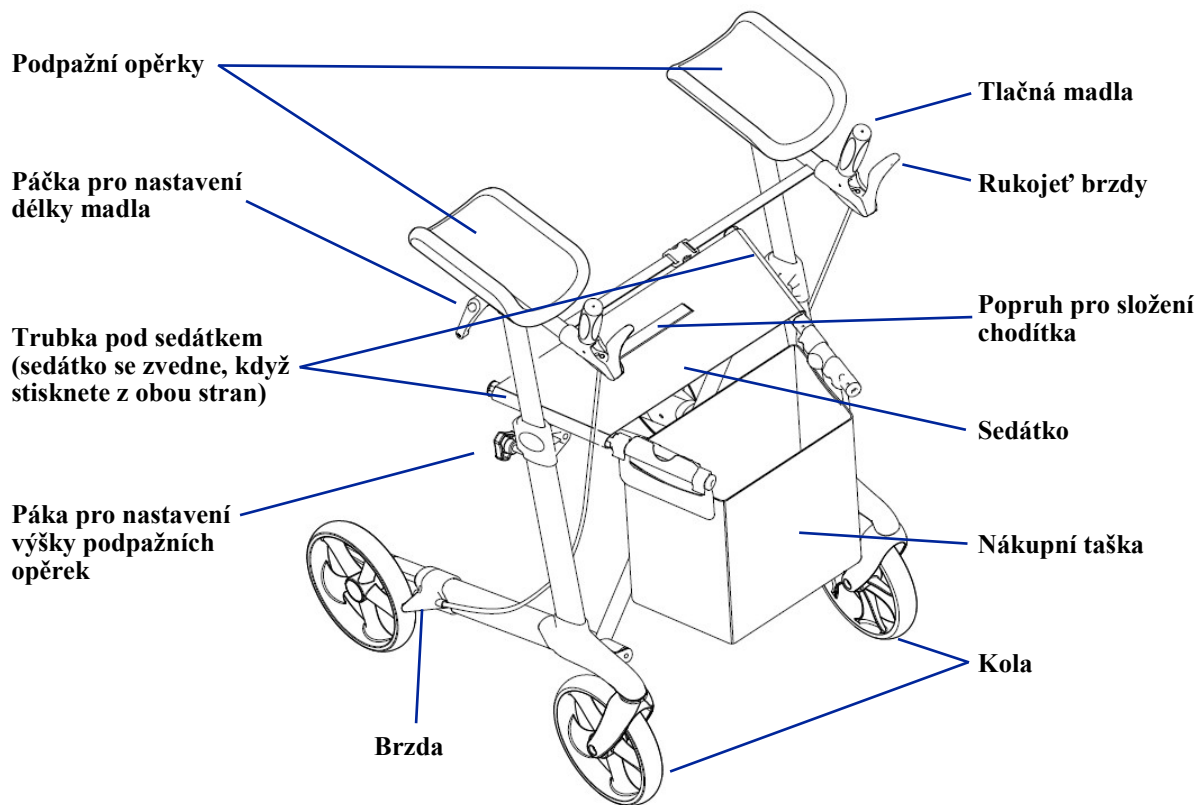

#### Kontrola po doručení

Po vybalení chodítka zkontrolujte, zda něco nechybí. Pokud byly dodány všechny díly uvedené na výkresu. Pokud nějaké díly chybí, neprodleně kontaktujte svého prodejce.

#### Rozložení chodítka

- Stlačte obě trubky pod sedadlem, dokud se rám nerozloží a neuslyšíte "cvaknutí". Nyní je zajišťovací zařízení v pevné poloze.
- Abyste si byli zcela jisti, že byl rám zcela rozložen, zkuste chodítko stlačit k sobě.
- Připevněte popruh, který spojuje obě tlačná madla (viz. fotografie vpravo). Po rozložení chodítka musíte zkontrolovat, zda je popruh zablokován
- Zkontrolujte, zda jsou páčky pro nastavení výšky pevně dotaženy
- Zkontrolujte, zda jsou obě madla ve stejné výšce a stabilní.



**Používání vadného chodítka je přísně zakázáno. Před použitím vždy zkontrolujte funkčnost všech částí chodítka. Při nedodržení výše uvedených doporučení může dojít ke zranění.**

#### Skládání chodítka

- Nejprve odepněte popruh, který je upevněn mezi oběma tlačnými madly.
- Zatáhněte za popruh u sedadla, dokud se rám nesloží k sobě.
- Nyní je chodítko složeno dohromady.

#### Nastavení výšky podpažních opěrek

- Nejprve odepněte popruh, který je upevněn mezi oběma tlačnými madly
- Uvolněte páku otočením doleva.
- Nastavte výšku
- Otočte páku doprava
- Znovu připevněte popruh

Obě madla by měla být vždy ve stejné výšce. Správná výška opěrek rukou by měla být vždy ve výšce loktů uživatele, když stojí s volně svěšenými rukama.



#### Otáčení opěrek předloktí (pouze model 312202)

- Uvolněte ruční šroub pod opěrkou.
- Nyní lze opěrku otočit dovnitř ve dvou krocích o 22,5 stupně.
- Po dosažení požadované polohy opět utáhněte ruční šroub.



Mobilex A/S  
Grønlandsvej 5, 8660  
Skanderborg, Denmark  
info@mobilex.dk  
www.mobilex.dk

Distributor v ČR:  
**PATRON Bohemia a.s.**  
Českolipská 3419, 276 01 Mělník, ČR  
tel.: 315 630 111  
[info.cz@patron.eu](mailto:info.cz@patron.eu) , <http://www.patron.eu>



### Nastavení délky tlačných madel

- Nejprve odpojte popruh, který je upevněn mezi oběma madly.
- Uvolněte páčku otočením doleva.
- Nastavte délku
- Otočte páku doprava
- Znovu připevněte popruh

### Funkce brzdy

- Chcete-li brzdít, musíte zatáhnout obě brzdové rukojeti směrem k sobě.
- Čím více zatáhnete, tím vyšší je brzdový výkon
- Abyste zajistili, že chodítko zůstane ZASTAVENÉ, musíte držet brzdové rukojeti zatažené.
- Chcete-li, aby se chodítko POHYBOVALO, musíte brzdové rukojeti pustit, čímž se brzdění zastaví.



Vždy aktivujte brzdy, pokud chodítko nepoužíváte!  
Nikdy neuvolňujte brzdy, pokud na chodítku sedíte!  
Při umístění chodítka na nerovinný povrch musíte vždy aktivovat brzdy!

### Aktivace a deaktivace brzd

- Pro zastavení chodítka zatáhněte za rukojeti brzd směrem nahoru.
  - Chcete-li chodítko zaparkovat, zatlačte rukojeti brzd směrem dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
  - Nesedejte na chodítko, pokud nejsou brzdy v zablockované poloze.
  - Před uvedením chodítka do pohybu se musíte postavit ve směru chůze a uvolnit brzdové rukojeti jejich zatažením směrem nahoru.
- Brzdy musí být při odstavení vozíku vždy v zablockované poloze! Nikdy nepoužívejte sedačku, pokud nejsou brzdy zajištěny!  
Při sezení se nikdy nenaklánějte dozadu. Doporučuje se sedět pouze v přední části sedadla. Nesedejte si na tašku.



### Popis funkce

Protože je možné rám sepnout, lze chodítko složit, a v důsledku toho vyžaduje velmi málo místa. Tlačná madla lze libovolně nastavit tak, aby odpovídaly velikosti vaší postavy. Sedátko umožňuje odpočinek.

### Příslušenství

Pro chodítko Mobilex "Tiger" jsou k dispozici různá příslušenství s následujícím číslem produktu. 312315, 312320, 31233D, 312325, 312347, 312362, 312363, 312368, 31236A, 31236B, 312321. Obraťte se prosím na svého prodejce.

### Doporučení pro přepravu

Doporučuje se převážet chodítko ve složené poloze. Jeho konstrukce umožňuje snadné rozkládání a skládání. Během přepravy byste měli zkontrolovat, zda je chodítko ve stabilní poloze, aby nedošlo k jeho deformaci.

### Použití

Postavte se doprostřed za zadní kola. Podpaží položte na podpěry a uchopte madla. Podpažní opěrky snižují zátěž vašeho zápěstí. Díky speciální konstrukci brzd je zapotřebí pouze malá námaha.

## 4. Technické údaje

<b>Mobilex Chodítko Tiger</b>	<b>Standard</b> Položka č. 312201 (antracitová šedá) Položka č. 312211 (červená)	<b>S otočnými područkami</b> Položka Č. 312202 (metalická hnědá)
Výška tlačných madel (nastavitelná)	90 cm - 115 cm	90 cm - 115 cm
Doporučená výška uživatele	150 - 200 cm	150 - 200 cm
Výška sedátka	62 cm	62 cm
Celková šířka rozložená / složená	62 / 22,5 cm	62 / 22,5 cm
Vnitřní šířka mezi tlačnými madly	46 cm	46 cm
Délka (hloubka)	66 cm	66 cm
Hmotnost (+ taška 380 g)	9,5 kg	9,5 kg
Maximální nosnost (chodítko / taška)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Brzdy	2 uzamykatelné s parkovací funkcí	2 uzamykatelné s parkovací funkcí
Velikost kol (přední a zadní)	200 x 35 mm	200 x 35 mm




Mobilex A/S  
Grønlandsvej 5, 8660  
Skanderborg, Denmark  
info@mobilex.dk  
www.mobilex.dk

Distributor v ČR:  
**PATRON Bohemia a.s.**  
Českolipská 3419, 276 01 Mělník, ČR  
tel.: 315 630 111  
[info.cz@patron.eu](mailto:info.cz@patron.eu) , <http://www.patron.eu>



### Štítek produktu

Na spodním rámu je umístěn štítek produktu

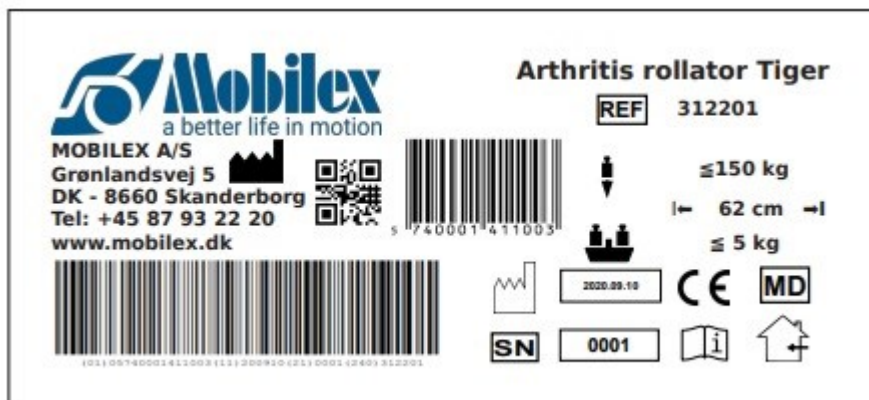

Příklad štítku produktu pro Tiger 312201

	QR-kód odkaz na domovskou stránku		Datum výroby
	Výrobce		Maximální zatížení
	Dodržujte návod k použití		Maximální šířka
	K použití v interiéru i exteriéru		Sériové číslo
	Výrobek s označením CE		Číslo položky
	Maximální zatížení košíku		Zdravotnické zařízení
	Pouze k použití v interiéru		

Přehled významu znaků

### 5. Údržba a péče

Běžné nečistoty lze odstranit běžnými čisticími prostředky a houbou nebo měkkým hadrem. Zkontrolujte informace o konkrétním produktu a používejte pouze komerční čisticí prostředky, které jsou vhodné pro čištění a dezinfekci (nepoužívejte prostředky obsahující alkohol a žádná rozpouštědla nebo abraziva).

Zařízení v podstatě nepotřebuje údržbu. I přes pevnou konstrukci a použití odolných materiálů produkt podléhá opotřebení. Doporučuje se proto výrobek v pravidelných intervalech kontrolovat odborným servisem. Doporučujeme kontrolovat následující položky:

- ✓ Čištění a dezinfekce výrobku
- ✓ Rám/produkt by měl být zkontrolován, zda není ohnutý, poškozený, opotřebovaný nebo zkorodovaný.
- ✓ Zkontrolovat opotřebované díly a v případě potřeby je vyměnit.
- ✓ Všeobecné dotažení výrobku

**Doporučená životnost:** Obvykle 10 let v závislosti na použití.

### Čištění kol

Doporučujeme čistit kola v horké vodě s jemným čisticím prostředkem. Pravidelně nebo když kola začnou vrzat, namažte ložiska olejem.

### Varování



Pokud je výrobek vystaven velmi vápenaté vodě, může dojít k vázání a hromadění vápna na ložiskách kol a dalších pohyblivých částech. V takovém případě lze výrobek vyčistit přípravkem na odstraňování vodního kamene a poté promazat mazacím olejem.

### Varování



Při použití ve vysoce chlorovaném prostředí může dojít k mimořádně silné korozi, která vede ke ztrátě záruky.

### Varování



Upozorňujeme, že pokud je rám ohnutý nebo zlomený, nesmí být výrobek recyklován, ale musí být vyměněn.

### Skladování

Doporučujeme skladovat na suchém místě.

### Doporučení pro přepravu

Zařízení by mělo být přepravováno stabilizovaným a zajištěným způsobem bez rizika náhlých nebo nebezpečných pohybů během přepravy.

### Opakované použití

Výrobek je vhodný k opakovanému použití. Před opětovným použitím, pokud má výrobek převzít nový uživatel, musí být výrobek zkontrolován podle bodu 5.



Mobilex A/S  
Grønlandsvej 5, 8660  
Skanderborg, Denmark  
info@mobilex.dk  
www.mobilex.dk

Distributor v ČR:  
**PATRON Bohemia a.s.**  
Českolipská 3419, 276 01 Mělník, ČR  
tel.: 315 630 111  
[info.cz@patron.eu](mailto:info.cz@patron.eu) , <http://www.patron.eu>



## 6. Řešení problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Chodítko se obtížně vede nebo tlačí	Nečistoty mezi koly a vidlicemi	Odstraňte nečistoty nebo vlasy mezi koly a vidlicemi
Brzdy nefungují nebo fungují pouze na jedné straně	Brzdové čelisti jsou opotřebované nebo brzdy nejsou správně seřizené	Seřídte brzdy. V případě potřeby vyměňte brzdové čelisti (→ servisní středisko).
Sedadlo se po rozložení vozíku nevejde dovnitř.	Blokovací zařízení je v nesprávné poloze nebo je vadné.	Zkontrolujte, zda je blokovací zařízení ve správné poloze. V případě potřeby jej vyměňte (→ servisní středisko)

## 7. Likvidace výrobku

Výrobek se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem, ale musí se odevzdat na místním recyklačním místě.

## 8. Záruka

Společnost Mobilex A/S poskytuje 2 roky záruku na škody způsobené chybami při výrobě nebo chybami materiálu. Záruka se nevztahuje na neúmyslné opravy nebo používání výrobku. Na díly podléhající běžnému opotřebení se záruka nevztahuje, pokud opotřebení není způsobeno výrobní vadou. Pokud jsou na výrobku provedeny změny bez našeho písemného souhlasu, označení CE a záruka na výrobek nejsou platné. V případě poškození výrobku, na které se vztahuje tato záruka, informujte svého prodejce nebo přímo společnost Mobilex A/S. Záruka se nevztahuje na náklady na dopravu a nezahrnuje náhradu za zranění osob nebo nepoužívání výrobku během opravy. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedodržením uživatelské příručky.



Mobilex A/S  
Grønlandsvej 5, 8660  
Skanderborg, Denmark  
info@mobilex.dk  
www.mobilex.dk

Distributor v ČR:  
**PATRON Bohemia a.s.**  
Českolipská 3419, 276 01 Mělník, ČR  
tel.: 315 630 111  
[info.cz@patron.eu](mailto:info.cz@patron.eu) , <http://www.patron.eu>



### Prohlášení o shodě (CE)

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, DK-8660 Skanderborg, Dánsko,

**Tímto prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost jako zákonný výrobce**, že výrobek uvedený na níže uvedeném seznamu výrobků splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost a je v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

Výrobek uvedený na níže uvedeném seznamu výrobků je „technická pomůcka pro osoby se zdravotním postižením“, klasifikovaná jako zdravotnický prostředek třídy I. Klasifikace je založena na požadavcích pravidla 1 přílohy VIII nařízení (EU) 2017/745.

Označení CE bylo na výrobek umístěno podle přílohy V nařízení (EU) 2017/745.

### SEZNAM PRODUKTŮ

**Chodítka Tiger – obj.č. 312201+312211**

**Chodítka Tiger s nastavitelnými područkami – obj.č. 312202**

### SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslo položky	Číslo položky příslušenství
312201+11	312315, 312320, 31233D, 312325, 312347, 312362, 312363, 312368, 31236A, 31236B, 312321

Číslo položky	Číslo položky příslušenství
312202	312315, 312320, 31233D, 312325, 312347, 312362, 312363, 312368, 31236A, 31236B, 312321

Harmonizované normy používané při odhadu shody:

PN-EN ISO 11199-2:2008; EN ISO 14971:2011, EN 1041:2009



EU 2017/745 pro zdravotnické vybavení

**V případě nezamýšlených incidentů nebo podezření na chyby, poruchy nebo závady produktu je třeba kontaktovat prodejce nebo Mobilex A/S**

**Thomas Nygaard Christensen**  
Jednatel Firmy  
Mobilex A/S  
Skanderborg, 14-09-2021

.....  
Podpis